

1

Λεύκανση και
Ενυδάτωση

2

Μείωση Λεπτών γραμμών

3

Συρρίκνωση πόρων

4

Ανόρθωση & Σύσφιξη

5

Διέγερσης Τριχοφυΐας

6



Εξάλειψη Κηλίδων

7

Εξάλειψη Ουλών



Χειροκίνητη εφαρμογή VS αυτόματη καθοδήγηση υγρού

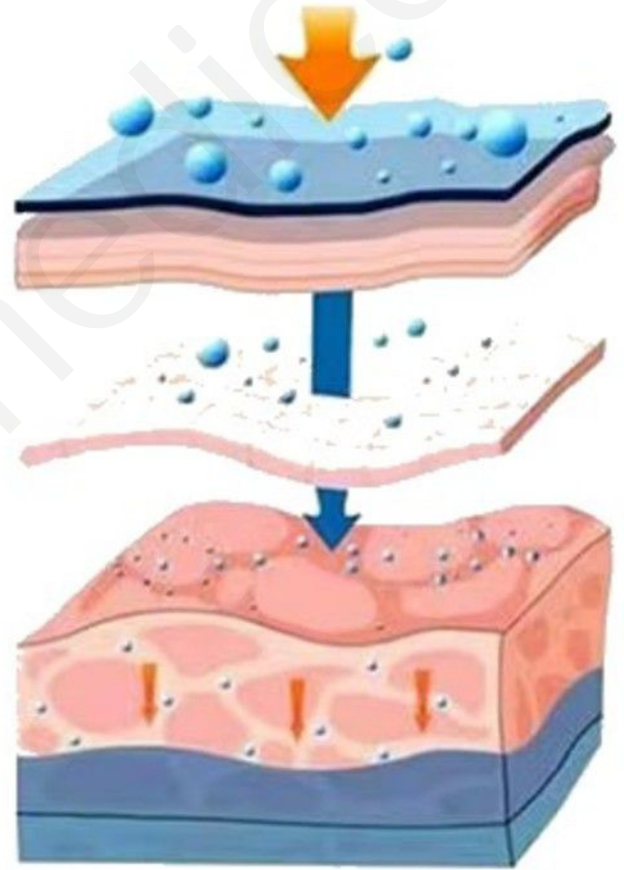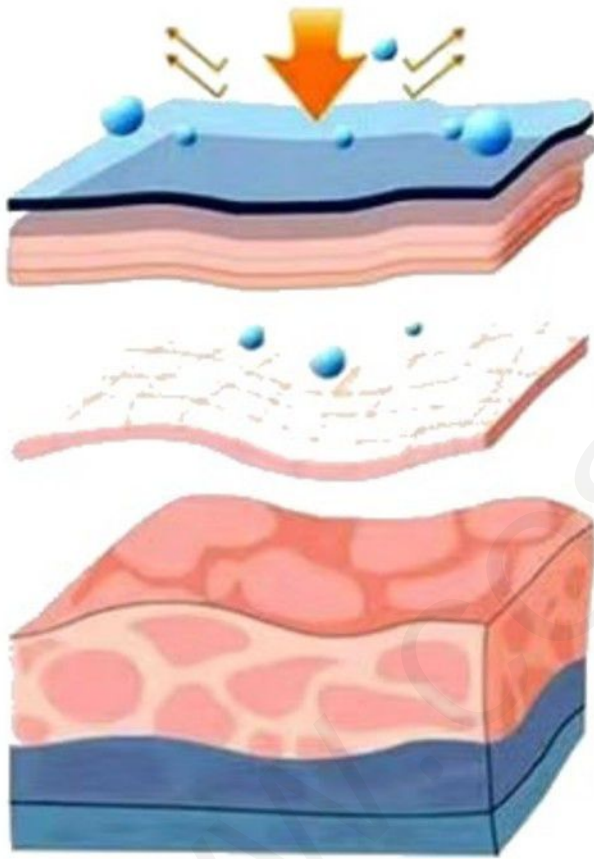

Ο ορός παραμένει κυρίως στην επιφάνεια, με χαμηλή απορρόφηση και περιορισμένη αποτελεσματικότητα, οδηγώντας σε σπατάλη προϊόντος.



Με απευθείας διοχέτευση του δραστικού προϊόντος μέσω της κεφαλής, ο ορός φθάνει σε βαθύτερα στρώματα του δέρματος, αυξάνοντας την απορρόφηση έως και 50%.

Νανο-μικροσίπ

Κατασκευασμένο από υψηλής καθαρότητας μονοκρυσταλλικό πυρίτιο, προσφέρει αυξημένη ασφάλεια, ανώδυνη και μη επεμβατική εφαρμογή.



Ρυθμιζόμενη κλίμακα

Η ρύθμιση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες της θεραπείας, με δυνατότητα προσαρμογής βάθους από 0 έως 0,27 mm.



Σύστημα εντοπισμού με κόκκινο φως

Το κόκκινο φως λειτουργεί ως οδηγός στόχευσης, εξασφαλίζοντας ακριβή εφαρμογή χωρίς απώλεια δραστικού προϊόντος.



Οθόνη πέντε ταχυτήτων

Διαθέτει 5 λειτουργίες περιποίησης δέρματος, από ήπια εφαρμογή έως ταχεία διείδυση, κατάλληλες για διαφορετικούς τύπους και ανάγκες δέρματος.

- 1: 400rpm
- 2: 2.500rpm
- 3: 7.000rpm
- 4: 13.000rpm
- 5: 18.000rpm

Οθόνη LCD πέντε ταχυτήτων

www.cosmedico.gr

Πατήστε παρατεταμένα για 3-5 δευτερόλεπτα
για να ξεκινήσει η συσκευή.

Μετά την εκκίνηση, η λειτουργία προχωρά
αυτόματα:

πατώντας ξανά μπαίνει στη 2η, 3η, 4η, 5η
ταχύτητα,



info@cosmedico.gr